



bioMérieux Deutschland GmbH · Postfach 1204 · 72602 Nürtingen

Datum: 06. Oktober 2021  
Abteilung: Wissenschaftlicher Kundendienst  
Ansprechpartner/in: Dr. Anja Schneider  
Tel.: +49 7022 3007-19  
Fax: +49 7022 3007-105  
E-Mail: [fielddactions\\_germany@biomerieux.com](mailto:fielddactions_germany@biomerieux.com)  
Unser Zeichen: SCA/HEA – FSCA 5333  
Ihr Zeichen:  
Ihre Kunden-Nr.:

**Bitte an das Labor weiterleiten**  
**– WICHTIGER, GLOBALER PRODUKT-SICHERHEITSHINWEIS – Korrektur**  
**VIDAS® Immunoassays – Mehrere Produktreferenzen**  
**Substratfehler – Mögliche verzögerte Ergebnisse**  
**Rückantwort erforderlich**


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen wichtige Informationen zu den VIDAS® Immunoassay-Produktreferenzen für klinische Anwendungen mitteilen, die in Tabelle 1 aufgeführt sind. Ihr Labor hat eine oder mehrere der folgenden VIDAS® Immunoassay-Produktreferenzen und Chargen erhalten.

**Problembeschreibung**

Seit Juli 2021 erreicht uns eine zunehmende Anzahl von Anfragen im Zusammenhang mit einem VIDAS® "Substratfehler". Dieser verhindert die Durchführung des Tests und führt zu einer möglichen Verzögerung der Ergebnisse, da eine weitere Testung durchgeführt werden muss.

Vor dem Start eines Testlaufs führt das VIDAS®-System eine Messung des Hintergrundsignals (Leerwertmessung bzw. RFU) durch. Während der Produktentwicklung jedes Endproduktes wird ein akzeptabler Grenzwert definiert, der je nach Test 300, 350 und 500 RFU (*Relative Fluorescence Unit* - Relative Fluoreszenzeinheit) beträgt. Das Substrat befindet sich in der letzten Kavität des VIDAS®-Testriegels und führt beim Abbau durch das Enzym (PAL) zu einer messbaren Fluoreszenz.

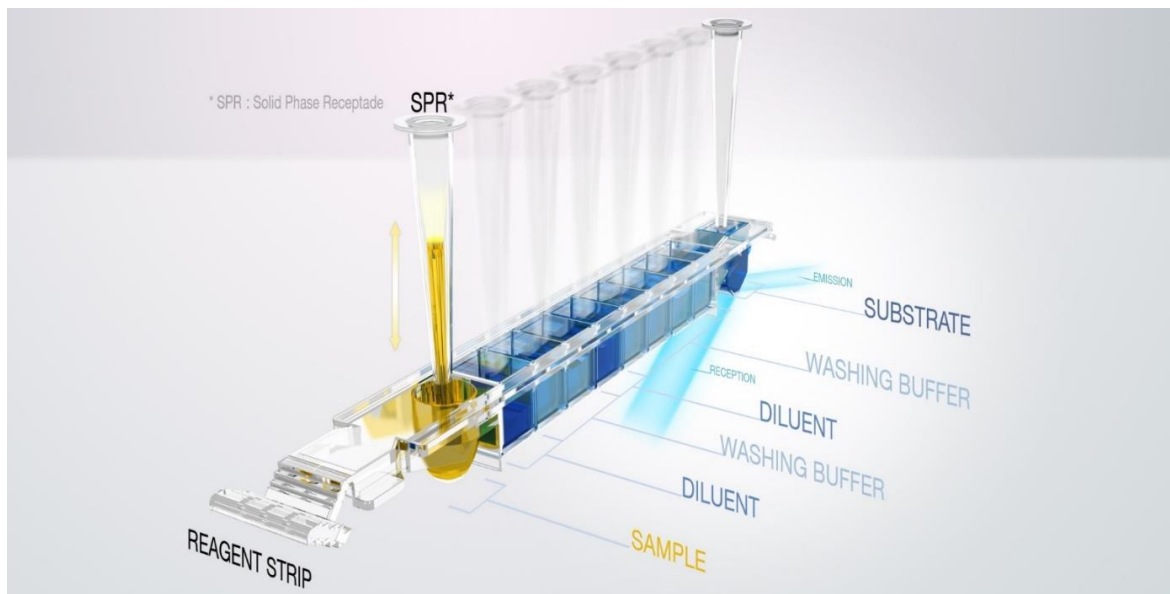

Der Fluoreszenzwert korreliert dann mit den Ergebnissen aller Tests.

Liegt bei der Durchführung eines Tests der RFU-Wert (Leerwert) über dem zulässigen Grenzwert, zeigt das System die Fehlermeldung "Substratfehler" an und die Testung wird gestoppt. Die Auslösung dieser Fehlermeldung gewährleistet, dass das System kein Ergebnis liefert, wenn der RFU-Wert über dem während der Produktentwicklung festgelegten Grenzwert liegt.

Diese bei allen Systemen der VIDAS®-Familie vorhandene Fehlermeldung garantiert, dass im Falle eines Substratabbaus **keine falschen Ergebnisse** geliefert werden können. **Dies bedeutet, es besteht lediglich das Risiko verzögerter Ergebnisse.**

Bei den umgehend eingeleiteten Untersuchungen zur Klärung der Ursache wurde Folgendes festgestellt:

- Alle betroffenen Chargen der VIDAS® Immunoassays entsprachen bei der Freigabe den Spezifikationen.
- Das Problem des Substratfehlers wurde bei allen VIDAS®-Immunoassay-Chargen bestätigt, die mit Substrat-Chargen hergestellt wurden, die eine gemeinsame Charge des Rohmaterials 4-MUP verwendeten; dies wurde als die wahrscheinlichste gemeinsame Ursache identifiziert.
- Das Problem wurde bei allen VIDAS® Immunoassay-Chargen identifiziert, die seit Februar 2021 mit Chargen des Substrats hergestellt wurden, die mit dieser betroffenen Rohstoffcharge produziert wurden.
- Das Problem ist auf einen beschleunigten Abbau des Substrats zurückzuführen, der im Laufe der Zeit einem linearen Prozess folgt und dazu führt, dass die zulässigen RFU-Grenzwerte vor Ablauf der festgelegten Haltbarkeitszeit des Produktes erreicht werden.
- Eine Analyse der kinetischen Entwicklung wurde durch Messung der Substrat-RFU einer statistisch repräsentativen Anzahl von VIDAS®-Immunoassays mit zurückgehaltenen Chargen (hergestellt mit dem Substrat, das den betreffenden Rohstoff enthält) bei unterschiedlichen Haltbarkeitszeiten durchgeführt.

- Dieses Modell ermöglicht es, die Geschwindigkeit des Substratabbaus unter Verwendung der betroffenen 4-MUP-Charge zu ermitteln und somit die Verfallsdaten für jede Charge der betroffenen VIDAS® Immunoassay-Endprodukte neu festzulegen.
- Wenn das Produkt bis zum revidierten Verfallsdatum verwendet wird, erfüllt es weiterhin die zugelassenen Leistungsdaten.
- Daher ist eine Korrekturmaßnahme erforderlich, die für alle Chargen der VIDAS® Immunoassays für klinische Anwendungen (siehe Tabelle 1 unten) ein geändertes Verfallsdatum beinhaltet, um sicherzustellen, dass die angegebenen Produkte weiterhin die in den Unterlagen angegebenen Leistungsspezifikationen erfüllen.

Wir sind uns bewusst, dass diese komplexe Situation zu erheblichen Unannehmlichkeiten führt. Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit, die für die erfolgreiche Umsetzung dieser Korrekturmaßnahme zum Schutz der Sicherheit von Patienten unerlässlich ist.

Derzeit modifizieren wir einige Chargen der im Lager befindlichen VIDAS® Immunoassays und bringen auf den Kits einen Aufkleber mit dem geänderten Verfallsdatum an. Um die Lieferkontinuität zu gewährleisten, ist es jedoch möglich, dass Sie für einen kurzen Zeitraum betroffene Chargen von VIDAS® Immunoassays für klinische Anwendungen ohne Aufkleber erhalten. Alle diese Chargen fallen in den Geltungsbereich dieses dringenden Produktsicherheitshinweises und sind in den verschiedenen Tabellen im Anschluss an diesen Brief aufgeführt.

### **Auswirkungen für Kunden/Patienten:**

Im Falle eines Substratfehlers kann es zu verzögerten Ergebnissen kommen. Es besteht kein Risiko von falschen Ergebnissen.

### **Erforderliche Maßnahmen:**

Bitte prüfen Sie, welche der in Tabelle 1 genannten Produktreferenzen Sie derzeit auf Lager haben, und führen Sie die in den entsprechenden Tabellen festgelegten Maßnahmen durch.

- **Für Produkte mit einer verbleibenden Restlaufzeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums) in Tabelle 1:**
  - Ermitteln Sie die in Tabelle 1 aufgeführten Produkte,
  - Ändern Sie das Verfallsdatum der verbleibenden verwendbaren Chargen gemäß Ihren internen Verfahren, um das neue, in Tabelle 1 angegebene Verfallsdatum einzuhalten.
  - Verwenden Sie das Produkt bis zum geänderten Verfallsdatum weiter.
- Wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche bioMérieux Niederlassung, um nach Ablauf des geänderten Verfallsdatums entsprechende Ersatzprodukte zu bestellen.
- **Für Produkte ohne Restlaufzeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums):**
  - Für die Produkte ohne Restlaufzeit (unter Berücksichtigung des geänderten Verfallsdatums) vernichten Sie bitte die verbleibenden Chargen in Ihrem Bestand und kontaktieren Sie Ihre örtliche bioMérieux Niederlassung, um eine Gutschrift zu erhalten und die Ersatzprodukte zu bestellen.



- Zur Erinnerung: Bitte lagern Sie die VIDAS® Referenzen bei 2-8°C, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.
- Bitte leiten Sie diese Information an alle betroffenen Mitarbeiter Ihres Labors weiter, bewahren Sie eine Kopie dieses Schreibens in Ihren Unterlagen auf und informieren Sie auch diejenigen Personen, die dieses Produkt möglicherweise verwenden oder Personen, denen Sie unser Produkt weitergegeben haben.
- Bitte senden Sie uns Seite 1 und Seite 2 der ausgefüllten Empfangsbestätigung (Anlage A) per Fax (+49 7022 3007-105) oder E-Mail (fieldactions\_germany@biomerieux.com) zurück.

Unser Ziel ist es, Ihnen Produkte von höchster Qualität zu liefern. Wir entschuldigen uns aufrichtig für alle Unannehmlichkeiten, die Ihnen dadurch entstanden sind.

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen oder Fragen haben, zögern Sie bitte nicht uns anzurufen. Wir sind gerne unter folgender Telefonnummer für Sie da: +49 7022 3007-19.

Mit freundlichen Grüßen  
bioMérieux Deutschland GmbH

A handwritten signature in blue ink that reads "Sabrina Wulf".

Sabrina Wulf  
Produktmanagerin

**Anlage A:** Empfangsbestätigung

**Tabelle 1: Liste der betroffenen VIDAS® Immunoassays für klinische Anwendungen:**

Produkt-Referenz	Produktbezeichnung	Tabelle
30118	VIDAS® C. difficile Toxin A & B	Siehe Tabelle 2
30125	VIDAS® C. difficile GDH	Siehe Tabelle 3
30211	VIDAS® TOXO Competition	Siehe Tabelle 4
30308	VIDAS® Anti-HCV	Siehe Tabelle 5
30314	VIDAS® Anti-HBc Total II	Siehe Tabelle 6
30315	VIDAS® HBs Ag Ultra	Siehe Tabelle 7
30318	VIDAS® Anti-HBs Total II	Siehe Tabelle 8
30405	VIDAS® HCG	Siehe Tabelle 9
30409	VIDAS® Progesterone	Siehe Tabelle 10
30421	VIDAS® CK-MB	Siehe Tabelle 11
30439	VIDAS® HBc IgM II	Siehe Tabelle 12
30443	VIDAS® HIV DUO Ultra	Siehe Tabelle 13
30446	VIDAS® Myoglobin	Siehe Tabelle 14
30447	VIDAS® HIV DUO Quick	Siehe Tabelle 15
30450	VIDAS® B•R•A•H•M•S PCT™	Siehe Tabelle 16
30455-02	VIDAS® D-Dimer Exclusion II™	Siehe Tabelle 17
30458	VIDAS® NT-proBNP2	Siehe Tabelle 18
30603	VIDAS® Digoxin	Siehe Tabelle 19
415386	VIDAS® High sensitive Troponin I	Siehe Tabelle 20
418115	VIDAS® Anti-HEV IgM	Siehe Tabelle 21
421172-03	VIDAS® NEPHROCHECK®	Siehe Tabelle 22
423077	VIDAS® DENGUE NS1 Ag	Siehe Tabelle 23
423078	VIDAS® Anti-DENGUE IgM	Siehe Tabelle 24





**Anlage A: EMPFANGSBESTÄTIGUNG: (Seite 2)**

**Für Produkte ohne Restlaufzeit bitten wir Sie, die Anzahl der vernichteten Packungen in folgender Tabelle einzutragen.**

<b>REF</b>	<b>Lot #</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Anzahl der vernichteten Packungen</b>
30443	1008675340	VIDAS HIV DUO ULTRA 60 TESTS	
30447	1008592410	VIDAS HIV DUO QUICK 60 TESTS	
30447	1008680850	VIDAS HIV DUO QUICK 60 TESTS	
30450	1008591130	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	
30450	1008633310	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	
30450	1008641870	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	
30458	1008693930	VIDAS NT-PROBNP 2 60 TESTS	
415386	1008694760	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	
415386	1008727610	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	
415386	1008666230	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	
415386	1008576310	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	
415386	1008677520	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	

**Bitte senden Sie uns die ausgefüllte Empfangsbestätigung (Seite 1 und Seite 2) per Fax (00800 1 3007 105) oder E-Mail ([fieldactions\\_germany@biomerieux.com](mailto:fieldactions_germany@biomerieux.com)) zurück.**

**DATUM .....**

**UNTERSCHRIFT .....**

**Tabelle 2: Produkte mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
30118	1008731010	VIDAS CD A.B 60 TESTS	09-Apr-2022	10-Mar-2022
30118	1008926680	VIDAS CD A.B 60 TESTS	08-Jul-2022	01-Jun-2022

**Tabelle 3: Produkte mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
30125	1008597480	VIDAS GDH 60 TESTS	18-Apr-2022	25-Jan-2022
30125	1008686700	VIDAS GDH 60 TESTS	06-Jun-2022	03-Mar-2022
30125	1008859220	VIDAS GDH 60 TESTS	03-Sep-2022	13-Jun-2022

**Tabelle 4: Produkte mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
30211	1008615860	VIDAS TOXO COMPETITION 60 TESTS	24-Feb-2022	09-Feb-2022
30211	1008864170	VIDAS TOXO COMPETITION 60 TESTS	28-Jun-2022	08-Jun-2022

**Tabelle 5: Produkte mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
30308	1008624280	VIDAS ANTI-HCV 60 TESTS	30-May-2022	26-Jan-2022
30308	1008837640	VIDAS ANTI-HCV 60 TESTS	14-Sep-2022	26-May-2022
30308	1008722870	VIDAS ANTI-HCV 60 TESTS	20-Jul-2022	25-Mar-2022
30308	1008808970	VIDAS ANTI-HCV 60 TESTS	09-Sep-2022	17-May-2022
30308	1008857200	VIDAS ANTI-HCV 60 TESTS	01-Oct-2022	16-Jun-2022
30308	1008860610	VIDAS ANTI-HCV 60 TESTS	01-Oct-2022	16-Jun-2022



**Tabelle 6: Produkte mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
30314	1008654830	VIDAS ANTI-HBC TOTAL II 60 TESTS	11-Mar-2022	23-Feb-2022

**Tabelle 7: Produkte mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
30315	1008612250	VIDAS HBS AG ULTRA 60 TESTS	26-Mar-2022	25-Jan-2022
30315	1008614380	VIDAS HBS AG ULTRA 60 TESTS	26-Mar-2022	25-Jan-2022
30315	1008642570	VIDAS HBS AG ULTRA 60 TESTS	22-Apr-2022	23-Feb-2022
30315	1008735620	VIDAS HBS AG ULTRA 60 TESTS	26-May-2022	07-Apr-2022
30315	1008790310	VIDAS HBS AG ULTRA 60 TESTS	05-Jul-2022	17-May-2022
30315	1008790410	VIDAS HBS AG ULTRA 60 TESTS	05-Jul-2022	17-May-2022
30315	1008861610	VIDAS HBS AG ULTRA 60 TESTS	06-Aug-2022	16-Jun-2022

**Tabelle 8: Produkte mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
30318	1008719940	VIDAS ANTI HBS TOTAL II 60T	29-Jul-2022	30-Nov-2021
30318	1008830740	VIDAS ANTI HBS TOTAL II 60T	07-Oct-2022	18-Jan-2022
30318	1008865350	VIDAS ANTI HBS TOTAL II 60T	03-Nov-2022	06-Feb-2022

**Tabelle 9: Produkte mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
30405	1008714630	VIDAS HCG 60 TESTS	26-Apr-2022	27-Nov-2021
30405	1008747680	VIDAS HCG 60 TESTS	11-May-2022	27-Nov-2021
30405	1008757640	VIDAS HCG 60 TESTS	18-May-2022	19-Dec-2021
30405	1008784120	VIDAS HCG 60 TESTS	03-Jun-2022	01-Jan-2022
30405	1008796930	VIDAS HCG 60 TESTS	02-Jun-2022	09-Jan-2022
30405	1008808600	VIDAS HCG 60 TESTS	14-Jun-2022	09-Jan-2022
30405	1008824160	VIDAS HCG 60 TESTS	17-Jun-2022	25-Jan-2022
30405	1008827550	VIDAS HCG 60 TESTS	16-Jun-2022	25-Jan-2022
30405	1008849560	VIDAS HCG 60 TESTS	01-Jul-2022	05-Feb-2022
30405	1008861770	VIDAS HCG 60 TESTS	08-Jul-2022	05-Feb-2022
30405	1008881760	VIDAS HCG 60 TESTS	15-Jul-2022	15-Feb-2022
30405	1008920140	VIDAS HCG 60 TESTS	06-Aug-2022	27-Feb-2022
30405	1008924590	VIDAS HCG 60 TESTS	05-Aug-2022	22-Mar-2022
30405	1008926200	VIDAS HCG 60 TESTS	18-Aug-2022	22-Mar-2022

**Tabelle 10: Produkte mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
30409	1008615920	VIDAS PROGESTERONE 60 TESTS	02-Mar-2022	03-Feb-2022
30409	1008685480	VIDAS PROGESTERONE 60 TESTS	20-May-2022	07-Apr-2022
30409	1008686900	VIDAS PROGESTERONE 60 TESTS	13-Apr-2022	22-Mar-2022
30409	1008730710	VIDAS PROGESTERONE 60 TESTS	29-Apr-2022	04-Apr-2022
30409	1008775650	VIDAS PROGESTERONE 60 TESTS	28-May-2022	09-May-2022
30409	1008816010	VIDAS PROGESTERONE 60 TESTS	10-Jun-2022	09-May-2022
30409	1008816030	VIDAS PROGESTERONE 60 TESTS	10-Jun-2022	09-May-2022
30409	1008873190	VIDAS PROGESTERONE 60 TESTS	08-Jul-2022	23-Jun-2022
30409	1008911230	VIDAS PROGESTERONE 60 TESTS	06-Aug-2022	05-Jul-2022

**Tabelle 11: Produkte mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
30421	1008557760	VIDAS CK MB 30 TESTS	21-Jan-2022	12-Jan-2022
30421	1008934620	VIDAS CK MB 30 TESTS	15-Jul-2022	29-Jun-2022

**Tabelle 12: Produkte mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
30439	1008636760	VIDAS HBC IGM II 30 TESTS	12-Mar-2022	23-Feb-2022
30439	1008888750	VIDAS HBC IGM II 30 TESTS	29-Jun-2022	08-Jun-2022

**Tabelle 13: Produkte mit und ohne verbleibende Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

**Tabelle13 a: Produkt OHNE verbleibende Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums).**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
30443	1008675340	VIDAS HIV DUO ULTRA 60 TESTS	30-Mar-2022	13-Sep-2021

**Tabelle 13b: Produkte mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
30443	1008745740	VIDAS HIV DUO ULTRA 60 TESTS	27-Apr-2022	18-Oct-2021
30443	1008829020	VIDAS HIV DUO ULTRA 60 TESTS	29-Jun-2022	19-Dec-2021
30443	1008834410	VIDAS HIV DUO ULTRA 60 TESTS	21-Jun-2022	06-Dec-2021

**Tabelle 14: Produkte mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
30446	1008658660	VIDAS MYOGLOBIN 30 TESTS	23-Mar-2022	26-Oct-2021
30446	1008708120	VIDAS MYOGLOBIN 30 TESTS	22-Apr-2022	14-Nov-2021
30446	1008802100	VIDAS MYOGLOBIN 30 TESTS	08-Jun-2022	01-Jan-2022
30446	1008813810	VIDAS MYOGLOBIN 30 TESTS	08-Jun-2022	01-Jan-2022

**Tabelle 15: Produkte mit und ohne verbleibende Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

**Tabelle 15a: Produkt OHNE verbleibende Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
30447	1008592410	VIDAS HIV DUO QUICK 60 TESTS	31-Jan-2022	07-Aug-2021
30447	1008680850	VIDAS HIV DUO QUICK 60 TESTS	11-Apr-2022	02-Oct-2021

**Tabelle 15b: Produkte mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
30447	1008802860	VIDAS HIV DUO QUICK 60 TESTS	13-Jun-2022	27-Nov-2021

**Tabelle 16: Produkte mit und ohne verbleibende Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

**Tabelle 16a: Produkte OHNE verbleibende Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums).**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
30450	1008591130	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	15-Aug-2022	20-Sep-2021
30450	1008633310	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	08-Sep-2022	28-Sep-2021
30450	1008641870	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	08-Sep-2022	28-Sep-2021

**Tabelle 16b: Produkte mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
30450	1008661450	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	21-Sep-2022	26-Oct-2021
30450	1008722440	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	27-Oct-2022	30-Nov-2021
30450	1008741790	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	07-Nov-2022	30-Nov-2021
30450	1008769030	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	24-Nov-2022	31-Dec-2021
30450	1008796890	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	11-Dec-2022	31-Dec-2021
30450	1008784200	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	30-Nov-2022	09-Jan-2022
30450	1008817120	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	15-Dec-2022	24-Jan-2022
30450	1008886330	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	18-Jan-2023	08-Feb-2022
30450	1008926040	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN 60T	08-Feb-2023	21-Mar-2022

**Tabelle 17: Produkte mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
30455-02	1008656010	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	23-Mar-2022	03-Mar-2022
30455-02	1008696080	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	13-Apr-2022	22-Mar-2022
30455-02	1008705690	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	18-Apr-2022	07-Apr-2022
30455-02	1008589420	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	16-Feb-2022	26-Jan-2022
30455-02	1008592150	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	23-Feb-2022	03-Feb-2022
30455-02	1008609020	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	26-Feb-2022	03-Feb-2022
30455-02	1008720080	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	18-Apr-2022	07-Apr-2022
30455-02	1008732940	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	04-May-2022	19-Apr-2022
30455-02	1008744900	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	07-May-2022	19-Apr-2022
30455-02	1008756000	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	17-May-2022	04-May-2022
30455-02	1008761030	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	22-May-2022	28-Apr-2022
30455-02	1008762030	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	25-May-2022	28-Apr-2022
30455-02	1008763980	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	24-May-2022	04-May-2022
30455-02	1008771100	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	31-May-2022	04-May-2022
30455-02	1008778230	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	30-May-2022	28-Apr-2022
30455-02	1008781240	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	03-Jun-2022	08-May-2022
30455-02	1008815220	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	14-Jun-2022	27-May-2022
30455-02	1008815240	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	13-Jun-2022	17-May-2022
30455-02	1008864310	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	15-Jul-2022	16-Jun-2022
30455-02	1008891770	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	27-Jul-2022	29-Jun-2022
30455-02	1008917580	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	17-Aug-2022	27-Jul-2022
30455-02	1008918050	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	31-May-2022	04-May-2022
30455-02	1008918060	VIDAS D-DIMER EXCLUSION II 60T	03-Jun-2022	08-May-2022

**Tabelle 18: Produkte mit und ohne verbleibende Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

**Tabelle 18a: Produkt OHNE verbleibende Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums).**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
30458	1008693930	VIDAS NT-PROBNP 2 60 TESTS	15-Apr-2022	13-Sep-2021

**Tabelle 18b: Produkte mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
30458	1008747590	VIDAS NT-PROBNP 2 60 TESTS	04-May-2022	11-Oct-2021
30458	1008776240	VIDAS NT-PROBNP 2 60 TESTS	01-Jun-2022	26-Oct-2021
30458	1008838180	VIDAS NT-PROBNP 2 60 TESTS	30-Jun-2022	17-Nov-2021
30458	1008851520	VIDAS NT-PROBNP 2 60 TESTS	30-Jun-2022	17-Nov-2021
30458	1008886400	VIDAS NT-PROBNP 2 60 TESTS	20-Jul-2022	22-Dec-2021
30458	1008894100	VIDAS NT-PROBNP 2 60 TESTS	27-Jul-2022	04-Jan-2022
30458	1008894140	VIDAS NT-PROBNP 2 60 TESTS	27-Jul-2022	04-Jan-2022

**Tabelle 19: Produkt mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
30603	1008824700	VIDAS DIGOXIN - DIG 60 TESTS	22-Jun-2022	27-May-2022

**Tabelle 20: Produkte mit und ohne verbleibende Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

**Tabelle 20a: Produkte OHNE verbleibende Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
415386	1008694760	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	06-Jul-2022	13-Sep-2021
415386	1008727610	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	29-Jul-2022	29-Sep-2021
415386	1008666230	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	19-Jun-2022	25-Aug-2021
415386	1008576310	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	08-May-2022	06-Jul-2021
415386	1008677520	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	01-Jul-2022	25-Aug-2021

**Tabelle 20b: Produkte mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
415386	1008752990	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	11-Aug-2022	11-Oct-2021
415386	1008768930	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	24-Aug-2022	26-Oct-2021
415386	1008768940	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	21-Aug-2022	30-Oct-2021
415386	1008801930	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	02-Sep-2022	08-Nov-2021
415386	1008809020	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	10-Sep-2022	08-Nov-2021
415386	1008827440	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	17-Sep-2022	18-Nov-2021
415386	1008829290	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	16-Sep-2022	08-Nov-2021
415386	1008843450	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	23-Sep-2022	18-Nov-2021
415386	1008848240	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	30-Sep-2022	30-Nov-2021
415386	1008848270	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	30-Sep-2022	30-Nov-2021
415386	1008867160	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	09-Oct-2022	12-Dec-2021
415386	1008867170	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	09-Oct-2022	12-Dec-2021



REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
415386	1008872350	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	08-Oct-2022	08-Dec-2021
415386	1008882110	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	15-Oct-2022	06-Dec-2021
415386	1008886390	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	19-Oct-2022	06-Dec-2021
415386	1008890790	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	18-Oct-2022	08-Dec-2021
415386	1008893760	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	26-Oct-2022	22-Dec-2021
415386	1008901930	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	28-Oct-2022	22-Dec-2021
415386	1008903780	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	29-Oct-2022	04-Jan-2022
415386	1008912850	VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I 60 TESTS	04-Nov-2022	04-Jan-2022

**Tabelle 21: Produkte mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
418115	1008652560	VIDAS HEV IGM 30T	19-Sep-2022	23-Feb-2022
418115	1008776540	VIDAS HEV IGM 30T	28-Nov-2022	28-Apr-2022
418115	1008868900	VIDAS HEV IGM 30T	16-Jan-2023	14-Jun-2022

**Tabelle 22: Produkte mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
421172-03	1008838860	VIDAS NEPHROCHECK 30 TESTS	22-Sep-2022	26-May-2022

**Tabelle 23: Produkte mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
423077	1008731920	VIDAS DENGUE NS1 AG 60T	26-Oct-2022	07-Apr-2022
423077	1008785470	VIDAS DENGUE NS1 AG 60T	29-Nov-2022	08-May-2022
423077	1008899350	VIDAS DENGUE NS1 AG 60T	03-Jan-2023	08-Jun-2022

**Tabelle 24: Produkte mit verbleibender Haltbarkeitszeit (unter Berücksichtigung des revidierten Verfallsdatums)**

REF	Lot #	Produktbezeichnung	Aktuelles Verfallsdatum	Revidiertes Verfallsdatum
423078	1008730620	VIDAS ANTI DENGUE IGM 60T	17-Oct-2022	07-Apr-2022
423078	1008781310	VIDAS ANTI DENGUE IGM 60T	27-Nov-2022	28-Apr-2022
423078	1008921610	VIDAS ANTI DENGUE IGM 60T	29-Jan-2023	30-Jun-2022